

# FLOCARE® INFINITY™ III

## Korte gebruiksinstructies



### 1. DE FLOCARE® INFINITY™ POMPSET PLAATSEN



Sluit de FloCare Infinity pompset aan zoals aangegeven op de verpakking van de FloCare® Infinity™ pompset. Open de pompdeur door onderaan op het lipje (A) te drukken en de deur (B) tegelijkertijd naar boven open te draaien.



Plaats de siliconen lus van de pompset om de rotor.



Trek zachtjes om de cassette in de pomp te plaatsen. De cassette past slechts op één manier in de pomp.




Sluit de pompdeur. De pomp is nu gereed om te worden geprogrammeerd.

Nutricia raadt aan om kant-en-klare sondevoeding te gebruiken aangezien deze is samengesteld voor de beoogde toedieningsspecificaties van de pomp. Bij de toepassing van gemengde voeding, opgeloste poedervoeding of borstvoeding dienen gebruikers zich ervan te vergewissen dat de voeding goed wordt bereid en opgelost ter voorkoming van de aanwezigheid van deeltjes, schuimvorming of aanslag in de FloCare Infinity pompset, die de werking van de pomp en het volgen van een normale voedings therapie kan belemmeren. Voeding die via het enterale toedieningssysteem wordt toegediend, moet een homogene samenstelling hebben en ook tijdens de voedings therapie homogeen blijven.

### 2. DE POMP PROGRAMMEREN

- > **Aan/uit-toets:** Druk 2 seconden om de pomp AAN of UIT te schakelen.
- > **Vul set'-toets:** Druk 2 seconden om de vul set-functie te activeren.
- > **Instellen-toets, 'Therapielijst aanpassen'.**
- > **Home-toets**
- > **Therapie-toets**

- A Volume - snelheid:**
  - de voortgangsbalk is volledig omlind
  - links in realtime informatie over het toegediende volume  
*De pomp staat standaard op stand A volume - snelheid*
- B Snelheid:**
  - de voortgangsbalk loopt uit; er is geen volume geprogrammeerd
  - links het toegediende volume sedert die laatst gewist werd
- C Intermitterend:**
  - de voortgangsbalk is onderverdeeld in het aantal geprogrammeerde porties
  - de geprogrammeerde portie wordt in realtime opgevuld

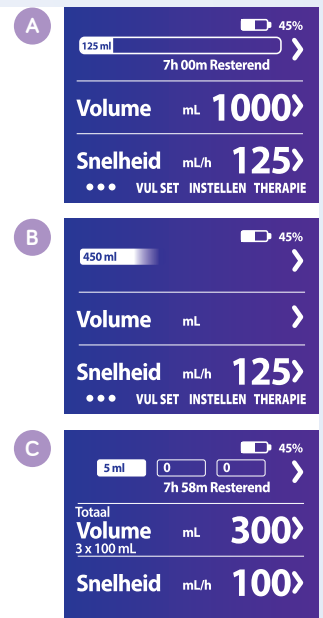

### 3. STARTEN

- Nieuwe patiënt:**
- > Zet de pomp aan
  - > Instellen
  - > Patiëntgegevens wissen: **Ja**

- Huidige therapie voortzetten:**
- > Zet de pomp aan
  - > Controleer ingestelde therapie op home scherm
  - > Druk op start → Maak een keuze → > Opnieuw opstarten. De voortgangsbalk resetten.  
> Verdergaan. Toediening hervatten.

- Alternatieve therapie starten:**
- > Zet de pomp aan
  - > Instellen → Therapielijst aanpassen → Activeer de gewenste therapie
  - > Druk op de home-toets
  - > Programmeer de gewenste therapie
  - > Druk op start

# ALARMEN, WAARSCHUWINGEN, PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Als een alarm of een waarschuwing wordt getoond op het scherm, druk op:



om het alarm 2 minuten te dempen; de waarschuwing blijft op het scherm staan



om het alarm te wissen



om suggesties op het scherm te laten weergeven voor het reageren op een alarm of waarschuwing.

## POMP VRAAGT ACTIE



**De pomp staat in pauze modus en is gedurende 2 minuten of langer niet geactiveerd** → Druk op de HOME toets om het alarm te stoppen.

## LUCHT IN POMPSET



**Er is lucht gedetecteerd in de pompset** → Indien het voedingsreservoir leeg is:  
■ Koppel het voedingsreservoir en de pompset los en gooi deze weg of vervang volgens instructie.

**Indien het voedingsreservoir niet leeg is:**

- Koppel los van de sonde en gebruik de VUL SET functie om de lucht te verwijderen
- Koppel de sonde weer aan en hervat de therapie.

**Indien het alarm blijft bestaan:**

- Vervang de pompset
- Controleer of er zich niet bovenmatig veel schuim in het voedingsreservoir bevindt
- Het gebied van de luchtsensor is vuil → Reinig de sensor, herplaats de pompset en herstart de pomp.

## PLAATS DE POMPSET OPNIEUW



**Pompset niet correct geïnstalleerd** → Herplaats de pompset.

## BATTERIJNIVEAU LAAG



**De batterijspanning is laag** → Sluit de pomp aan op de adapter en de netspanning om de batterij gedurende 6 uur op te laden. De pomp kan tijdens het opladen gewoon worden gebruikt.

## BATTERIJ LEEG



**De batterijspanning is gezakt tot onder de kritische grens** → Sluit de pomp aan op de adapter en de netspanning om de batterij gedurende 6 uur op te laden. De pomp kan tijdens het opladen gewoon worden gebruikt.

## OCCLUSIE IN



**Pomp heeft een verstopping tussen de pomp en het voedingsreservoir gedetecteerd** → Controleer de pompset tussen de pomp en het voedingsreservoir op knikken of andere obstructies en hef deze op. Herstart de pomp.

**Het gebied van de sensor is vuil** → Reinig de sensor, herplaats de pompset en herstart de pomp.

**Zich herhalend alarm** → Als het alarm voortduurt, vervangt u de Flocare Infinity pompset.

## OCCLUSIE UIT




**Pomp heeft een verstopping tussen de pomp en de sonde gedetecteerd** → Controleer de pompset tussen de pomp en de sonde op knikken of andere obstructies en los deze op.

**Het gebied van de sensor is vuil** → Reinig de sensor, herplaats de pompset en herstart de pomp.

**Zich herhalend alarm** → Als het alarm voortduurt, vervangt u de Flocare Infinity pompset.


## THERAPIE VOLTOOID



**De pomp heeft het toedienen van de geprogrammeerde therapie voltooid** → Druk op de HOME-toets  wanneer de therapie is voltooid.

## SYSTEEMFOUT



**De pomp heeft een interne systeemfout ontdekt** → Schakel de pomp UIT , controleer of de pompdeur dicht is en schakel de pomp weer IN .

Blijft het probleem zich voordoen, neem dan contact op met de medische zorgverlener of laat de pomp onderhouden als de storing niet verdwijnt.

Bij alarmen die niet hier genoemd zijn kunt u onder de informatietoets  lezen wat er voor actie nodig is om het alarm op te lossen.