


Flocare® Infinity™:

Korte gebruiksinstructies



De Flocare® Infinity™ pompset plaatsen

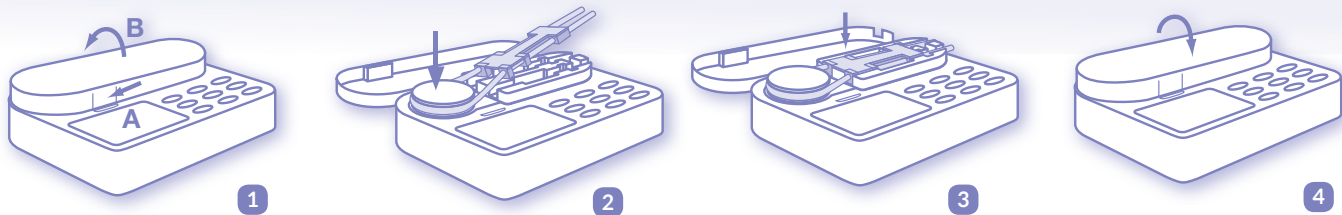

- 1 Sluit de pompset aan met de voedingsverpakking zoals aangegeven op de verpakking van de Flocare® Infinity™ pompset. Open de pompdeur door onderaan op het lipje (A) te drukken en de deur (B) tegelijkertijd naar boven open te draaien (fig.1).
- 2 Plaats de siliconenlus van de pompset om de rotor. (fig. 2)
- 3 Trek zachtjes om de cassette in de pomp te plaatsen. (fig. 3)
- 4 Sluit de pompdeur. (fig. 4) De pomp kan nu ingesteld worden.

Indien mogelijk adviseren we het gebruik van kant-en-klare sondevoeding, aangezien de gebruiksspecificaties van de pomp daarop zijn afgestemd. Indien gemengde of gereconstitueerde poedervormige voedingen worden gebruikt, verzeker u er dan van dat de voeding correct is bereid en volledig is opgelost. Dit om niet opgelost poeder of ophoping in de toedieningsset, die potentieel de correcte werking van de pomp kunnen beïnvloeden, te voorkomen. Elke voeding die via een sonde wordt gegeven dient homogeen te zijn en te blijven gedurende de aanhangtijd.

Gebruiksaanwijzing

- ON/OFF** > Druk gedurende 2 seconden op de "ON/OFF"-toets om **de pomp aan** (of uit) **te zetten**; de pomp piept en voert een korte zelftest uit. De pomp staat nu aan - in pauzefunctie - en geeft het totaal toegediend volume aan sinds het geheugen werd gewist.
- CLR** > Druk op de CLR-toets om het **toegediend volume te verwijderen**.
- FILL SET** > Druk gedurende 2 seconden de "FILL SET"-toets in om de pompset automatisch te vullen. Laat de toets los wanneer de pomp piept en de pompset gevuld wordt. Tijdens het vullen verschijnt FILL SET op het scherm. De pomp stopt zelf als de pompset volledig met voeding gevuld is. FILL SET kan op ieder moment onderbroken worden door een tweede keer op de FILL SET-toets te drukken.
Verbind de pompset met de sonde en kies programma 1 of 2.

FILL SET mag enkel gebruikt worden om een lege (met lucht gevulde) pompset te vullen. Elk ander gebruik kan een verkeerde calibratie van de pomp veroorzaken.

Gebruik pompset

Voor patiënten bij wie een onderbreking of een vertraging van de voedingstherapie van invloed kan zijn op de gezondheidsstatus, adviseren wij altijd de DOSE instelling van de Infinity pomp te gebruiken. Kies dan altijd programma 2.

> Gebruik iedere 24 uur een nieuw Flocare Infinity toedieningssysteem.

- 1 Continue voeding instellen **ml/h** > **+ 400 ml/h** > **START/STOP**
- 1 ml/h
- 2 Een dosis instellen **ml/h** > **+ 400 ml/h** > **+ 4000 ml** > **START/STOP**
- 1 ml/h **- 1 ml**

- START/STOP** > Druk éénmaal op de "START/STOP"-toets om de pomp tijdens het voeden **in pauze te zetten**. De pomp geeft drie pieptonen en het werkingssymbool verdwijnt van het scherm.
- INFO** > Een druk op de INFO-knop geeft het totaal toegediend volume weer.

Ga naar www.nutriciaflocare.com voor de meest recente versie van de 'Flocare Infinity Instructions For Use'

NUTRICIA
flocare *Infinity*™

Flocare® Infinity™: Alarmen bij Flocare® Infinity™

Melding

Oorzaak > Oplossing

NO SET

- **Geen of slecht geplaatste pompset** > Stop het alarm door op **START/STOP** te drukken. Plaats de Flocare® Infinity™ pompset zoals aangegeven op de verpakking en sluit de deur. Start de pomp opnieuw. Reinig indien nodig de sensoren.
- **De druksensor is vuil** > Reinig de druksensor; plaats de pompset opnieuw en start de pomp opnieuw.

PUSH STRT

- **De pomp staat in pauze en is gedurende 3 minuten of langer niet geactiveerd** > Stop het alarm en verleng de pauze nogmaals met 3 minuten door op **START/STOP** te drukken. Stel de pomp in en start door op **START/STOP** te drukken.

END OF DOSE

- **De ingestelde dosis of volume is toegediend.** > Druk op **START/STOP** om het alarm uit te zetten. Druk op de **INFO** en vervolgens op **CLR** om het toegediend volume uit het geheugen te wissen. (Om tegelijkertijd de toedieningssnelheid en de dosis te wissen moet de **CLR** 3 seconden ingedrukt worden).

PROG

- **Er is geen toedieningssnelheid ingesteld: 0 ml/h** > Stel de gewenste toedieningssnelheid in: druk op **ml/h**, daarna op **+** of **-**.

DOOR

- **De deur is niet goed gesloten** > Sluit de deur voordat de pomp aangezet wordt.

AIR

- **Lucht in de pompset** > Stop de pomp door op **START/STOP** te drukken. Vervang de lege voedingsverpakking en start het voeden opnieuw. Vul de pompset indien nodig.
- **De luchtsensor is vuil** > Reinig de sensor.
- **De pompset is niet goed geplaatst** > Plaats de pompset goed in de pomp.

Niet-vloeibare ingrediënten en gemixte of poedervormige voedingsmiddelen kunnen de toevoer in de sonde en in het toedieningssysteem belemmeren. Tevens kunnen zij zich hechten aan de binnenzijde van het toedieningssysteem en daarmee de werking van de air-in-line pompsensoren beïnvloeden.

BATT

de pomp blijft werken

- **De batterijlading is te laag** > Sluit de adapter op de pomp en het stroomnet aan en laad de pomp gedurende 6 uur op. Tijdens het laden kan de pomp normaal gebruikt worden.

BATT met knipperende E en F

- **Batterijstoring** > Schakel de pomp uit en neem contact op met uw medische zorgverlener of laat de pomp onderhouden.

FILL SET

- **De pomp vult de set** > Druk opnieuw op **FILL SET** om de pomp te stoppen en opnieuw in pauze te zetten.

OCC IN

- **Er is een verstopping tussen het Pack en de pomp (ingående voedingsstroom)** > Stop het alarm door op **START/STOP** te drukken. Verwijder de pompset uit de pomp en controleer de doorgankelijkheid van de pompset. Plaats de pompset opnieuw en herstart de pomp.
- **De druksensor is vuil** > Reinig de druksensor; plaats de pompset opnieuw en herstart de pomp.

OCC OUT

- **Er is een verstopping tussen de pomp en de patiënt (uitgaande voedingsstroom)** > Stop het alarm door op **START/STOP** te drukken. Controleer de doorgankelijkheid van de pompset en van de sonde.
- **De druksensor is vuil** > Reinig de druksensor; plaats de pompset opnieuw en herstart de pomp.
- **De kraan van de medicatiepoort zit dicht** > Open de kraan.

OCC OUT

herhaalde

- **IJking nog niet voltooid voor de huidige pompset** > Stop het alarm door op **START/STOP** te drukken. Start de pomp door op **START/STOP** te drukken en laat de pomp kort lopen. Stop de pomp door op **START/STOP** te drukken; verzeker je ervan dat er geen "OCC OUT" alarm was. Haal de pompset uit de pomp en plaats deze opnieuw. Herstart de pomp.

LOCK

- **Voor deze patiënt is enkel het geprogrammeerde voedingsschema toegestaan door de medische zorgverlener. De instelfunctie is geblokkeerd in de instelmodus van de pomp** > Vraag de medische zorgverlener om deze instelling te wijzigen.

ER01 - ER99

- **De zelftest heeft een elektronische storing ontdekt** > Schakel de pomp uit, controleer of de pompdeur gesloten is en schakel de pomp weer in. Neem contact op met uw medische zorgverlener of laat de pomp onderhouden als de storing niet verdwijnt.

GEEN STEKKERSYMBOL

terwijl de pomp op het stroomnet is aangesloten

- **Het stopcontact werkt niet** > Sluit de pomp op een ander stopcontact aan.
- **De adapter is beschadigd** > Neem contact op met Nutricia Medische Voedingsservice voor een nieuwe adapter.

Wilt u meer informatie of advies? Neem dan contact op met onze diëtisten van Nutricia Medische Voedingsservice:
internet: www.nutriciamedical.nl
telefoon: 0800-022 33 22 (gratis, op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)
e-mail: medischevoeding@nutricia.com

Nutricia Nederland B.V.
Postbus 445, 2700 AK Zoetermeer

NUTRICIA
flocare Infinity™