


INSTRUCTIEKAART

Aansluiten van de nieuwe Sondevoedingfles



1 Voorbereiding

Om passage van de voeding te bevorderen adviseren wij in een halfzittende positie te voeden en deze positie tot een half uur na het voeden aan te houden.

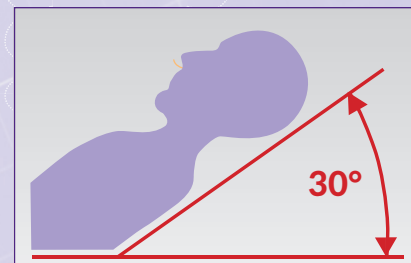

2

1. Verzamel alle benodigheden (fles sondevoeding, Flocare toedieningsysteem, pomp etc.)
2. Maak de werkplek schoon
3. Was de handen met zeep en droog ze af met een schone handdoek



3

Verwijder de verpakking van het toedieningsysteem.



4

Verwijder het kapje van de plus connector.



Zorg dat plusvormige connector onder het kapje niet met de vingers wordt aangeraakt om besmetting te voorkomen.



5 Open de flip-top dop.



Zorg dat de plusvormige poort niet met de vingers wordt aangeraakt om besmetting te voorkomen.





6 Zet de fles rechtop om het toedieningssysteem met de fles te kunnen verbinden. De plusvormige connector(+) op het toedieningssysteem dient verbonden te worden met de plusvormige poort(+) op de fles.



7 Het is belangrijk om eerst het toedieningssysteem door de seal heen te duwen voordat het systeem wordt vastgedraaid.



8 De fles is nu aangesloten en er kan gevoed worden volgens de normale werkwijze.

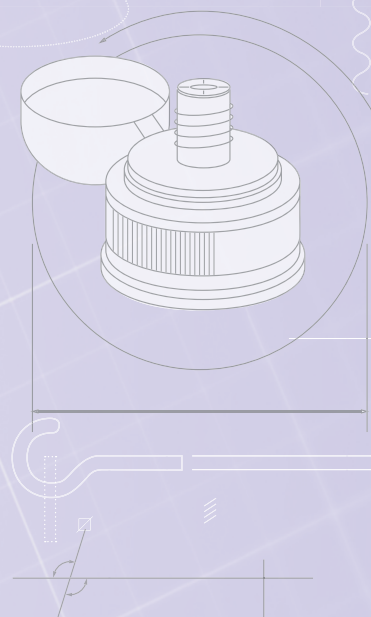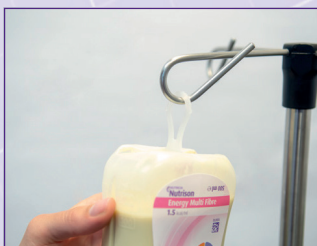

Nutrison en Nutriini zijn voedings voor medisch gebruik. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. 900328NAM

Wilt u meer informatie of advies?
Neem dan contact op met onze diëtisten
van Nutricia Medische Voedingsservice:

www.nutriciamedical.nl
medischevoeding@nutricia.com
0800-022 33 22 (gratis, op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)